

adesso split® Systeme

10000	Symmetrie ARTEX® + ARTIST®
10000-C	Symmetrie ARTEX® Carbon 126mm
10000-CD	Symmetrie ARTEX® Carbon 116mm
10001	Symmetrie BALANCE®
10002	Symmetrie DENAR®
10003	Symmetrie DENTATUS®
10004	Symmetrie KAVO®PROTAR
10005	Symmetrie PANADENT®
10006	Symmetrie RATIONAL®
10007	Symmetrie SAM®
10008	Symmetrie STRATOS®
10009	Symmetrie KAVO®PROTAR EVO
10015	Symmetrie SAM®=ARTEX®
10017	Symmetrie REFERENCE®SL

adesso split® Zentrierschlüssel

10025	Zentrierschlüssel ARTEX®/Stratos®/Reference®
10025-C	Zentrierschlüssel ARTEX®Carbon
10027	Zentrierschlüssel Denar®
10029	Zentrierschlüssel Dentatus®/Balance®
10030	Zentrierschlüssel Kavo®
10031	Zentrierschlüssel Panadent®
10033	Zentrierschlüssel SAM®P
99999	Holzschatulle für Zentrierschlüssel

Mehr Informationen zu unseren adesso split® Produkten, finden Sie in Ihrem aktuellen Baumann Dental Katalog.



Baumann Dental GmbH
Frankenstraße 25

D-75210 Keltern-Ellmendingen

Telefon +49 72 36 / 98 07 00

Telefax +49 72 36 / 98 07 98

info@baumann-dental.de

www.baumann-dental.de

Die Baumann Philosophie:



Konsequente
Artikulator-Gleichschaltung

adesso
split

1.

1. Den Artikulator auf evtl. Defekte kontrollieren.
2. Zentrierverriegelung aktivieren
3. Kondylenbahnneigung auf 35°
4. Bennetwinkel auf 10° - 15°
5. Inzisalstift auf Position „0=Null“ stellen.



5.

Die Justiersockelplatte überprüfen auf Sauberkeit und diese vorsichtig aufsetzen.



9.

Den Artikulator öffnen und den Justierkleber sorgfältig auf die Justiersockelplatte aufbringen.



2.

Die Sockelplatte im Artikulator-Oberteil einsetzen und handfest anziehen. Wir Empfehlen den Einsatz von Loctite®243 Schraubensicherungsmittel.



6.

Den Artikulator schließen. Hierzu ist es notwendig, den Zentrierschlüssel leicht nach hinten zu kippen!



10.

Den Artikulator vorsichtig schließen. Hierzu ist es wieder notwendig, den Zentrierschlüssel leicht nach hinten zu kippen!



3.

Den Zentrierschlüssel auf Sauberkeit der Passflächen kontrollieren und die Inbusschraube (siehe Pfeil) festziehen.



7.

Überprüfen Sie bitte, ob der Inzisalstift auf dem Teller aufliegt und die Justiersockelplatte keinen Kontakt zum Artikulatorunterteil aufweist.



11.

Wir Empfehlen, den Artikulator mittels einem Gummiband geschlossen zu fixieren, und den Klebstoff 120 Minuten aushärten zu lassen.



4.

Den Artikulator Umdrehen und Öffnen. Den Zentrierschlüssel einsetzen. Wichtig: Die Öffnung der Inbusschraube zeigt in Richtung Artikulatoroberteil.



8.

Den adesso split® Justierkleber (#11000) auf einer sauberen Fläche applizieren diesen und sorgfältig vermischen.



12. Überprüfen der Gleichschaltung:

1. Die zentrale Inbusschraube lösen und herausnehmen.
2. Den Schlüssel gleichmäßig auseinanderziehen.
3. Die Paßstifte (siehe Pfeile) mit der Hand entfernen.
4. Den einzelnen Teile des Schlüssels in den Artikulator einsetzen.
5. Artikulator visuell überprüfen.



Die Paßstifte sollten grundsätzlich vor dem Zusammenbau mit einem feinen Maschinöl benetzt werden